


バスト施術のお作法ガイド

背面

①耳下腺～肩
耳下腺から肩に向かって
凝りをとるように
照射していきます。

②背骨の際
背骨の上ではなく、背
骨の両サイドの際の部
分をしっかり流すよ
うに照射していきます。

③背中～バスト
背中のお肉をバストに
あつめるように照射し
ます。

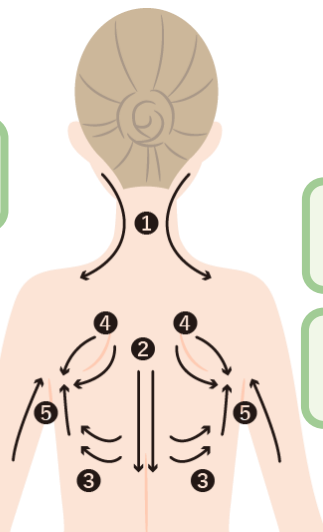


④肩甲骨周り
肩甲骨を中心として両
サイドを照射します。

⑤腕～腋窩リンパ
二の腕のお肉を腋窩リンパ
に流すように照射してい
きます。

正面

⑥鎖骨上下
鎖骨の上下をそれぞれ腋窩
に流すよう照射してきます。

⑦脇腹～バスト
背中で流したお肉
をバストに持って
くるように照射し
ます。

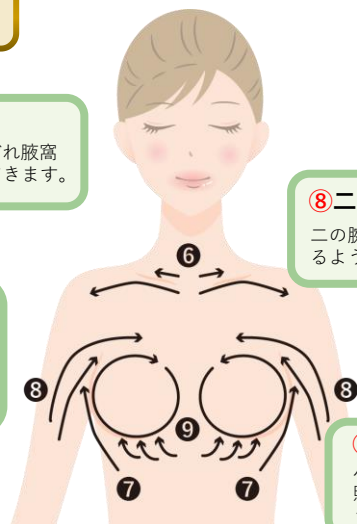

⑧二の腕～腋窩～バスト
二の腕のお肉をバストに集め
るように照射していきます。

⑨バスト周り
バスト中心に寄せ集めるよう
に照射します。最後は形を作るよ
うにバスト周りを照射します。

手順

- ①背面から照射するため、うつ伏せの状態になります。
- ②照射されない箇所はしっかりタオルをかけましょう。【背面照射 動画】
- ③手やスパチュラで背面の照射部分にファストヒアローションを塗布。
- ④光照射。(背面照射動画参照)
- ⑤背中に残ったファストヒアローションを全体にマッサージするように馴染ませていきます。



手順

※乳頭部へ触れないよう施術をしてください。

- ①正面の照射をするため、仰向けの状態になります。
- ②照射されない箇所はしっかりタオルをかけましょう。
- ③手やスパチュラで正面の照射部分にファストヒアローションを塗布。
- ④光照射。(前面照射動画参照)
- ⑤バストの形を整えるようにファストヒアローションを馴染ませていきます。
- ⑥ボンボンジェリームを手のひらで伸ばし、バストをマッサージしていきます。(ボンボン参照)

【前面照射 動画】



【ボンボン 動画】

