

光フェイシャルお手入れ法

FACE A/B/C/Dフィルターの使い方

基本光フェイシャル

悩み

しわ・たるみ・ニキビ・シミ・毛穴などお顔全体に複数のお悩みをお持ちのお客様。

効果

フェイシャルの光が線維芽細胞にアプローチします。コラーゲンやヒアルロン酸、エラスチンの生成を促し、さらに光エネルギーによって肌代謝を促すことでターンオーバーが促進。お肌の土台から改善していきます。お手入れ後にハリやリフトアップ、美白など様々な効果が実感できます。

お手入れ方法

顔80ショット、首顔160ショットに収めましょう。

- 1 ファストヒアローションをお肌に塗布し、**FACE A** 【光フェイシャル動画】のフィルターを使い首～お顔の全体を照射します。

様々な悩みをお持ちのお客様にはメインのフィルターにてお肌全体にアプローチをしていきます。リンパを流すように照射することでお顔全体の血流が良くなり栄養がいきわたります。



- 2 お仕上げ

ジェルをスポンジやタオルで拭き取った後、パックや化粧水、クリームなどでお肌を整えます。