

光フェイシャルお手入れ法

FACE A/B/C/Dフィルターの使い方

悩み別光フェイシャル

悩み

お顔全体も気になるが、ポイントでより特化されたケアをされたい方。悩みがニキビ、シミ、赤ら顔など明確にある方。

効果

FACE B/C：ニキビ・赤ら顔により効果的な光を照射していきます。ニキビの原因となるアクネ菌の増殖を抑え、今あるニキビを早く枯れさせていきます。また、血流が良くなることで赤ら顔の改善も行っていきます。

FACE D：お肌のターンオーバーを正常化させることでシミを徐々に押し上げ改善していきます。

お手入れ方法

顔80ショット、首顔160ショットに収めましょう。

- 1 ファストヒアローションをお肌に塗布し、**FACE A**のフィルターを使い首～お顔の全体を照射します。

メインのフィルターにてお肌全体にアプローチをしていきます。リンパを流すように照射することでお顔全体の血流が良くなり栄養がいきわたります。

【光フェイシャル動画】



- 2 悩みに沿ったフィルター**FACE B/C・D**を使用

【囲い打ち動画】 【隠し打ち動画】

お客様の悩みに沿ったフィルター（**FACE B/C・D**）に変えて、気になる部分を単発にて囲い打ち又は隠し打ちしていきます。



- 3 お仕上げ

ジェルをスポンジやタオルで拭き取った後、パックや化粧水、クリームなどでお肌を整えます。お悩みに特化された商材をご利用いただくとより効果的です。